見える滅菌コンテナー

iCon

軽くて中が見える・フィルター交換不要・プラズマ滅菌対応オートロック(新機能)・安心の5年保証・優れたバリア性





見える滅菌コンテナー

iCon

プラスチック本体&ステンレスフィルター

軽くて中が見える

フタも本体もプラスチック(ポリフェニルサルフォン)なのでとても軽量で、フタは全面的に透明です。 セット内容も、内部インジケータも、乾燥状態も、 滅菌後でもフタを開けずに確認できるので安心です。

ポリフェニルサルフォンの比重

1.3

アルミニウムの比重

2.7

見えるインジケータ

フタの内部に市販のインジケータを差し込めます。 滅菌後にフタを開けなくても滅菌確認できます。









フィルター交換不要

ステンレス繊維のフィルターなので繰り返し使えます。 5,000回滅菌してもステンレスフィルターの目詰まりは わずか4%。しかも半分の面積でも十分滅菌できます。 手間もランニングコストもかからず廃棄物も出ません。



ステンレスフィルター マイクロスコープ画像



iConステンレスフィルター

97.4

他社製ペーパーフィルター

69.0

プラズマ滅菌対応

ステンレスフィルターは過酸化水素の吸着がないのでプラズマ滅菌・過酸化水素滅菌に対応します。オートクレーブはもちろん、EOG滅菌にも対応します。各滅菌方法のテストパックを中に入れて滅菌可能です。

オートロック (新機能)

滅菌時の真空工程で自動的に青いピンが出てロックします。 誤開封防止用の消耗品は不要で、手間もコストも抑えます。 うっかりピンを押してしまわないためのストッパー付き。 ストッパーを押さえながらピンを押し込んで解除します。



安心の5年保証

ポリフェニルサルフォンは耐久性に優れるプラスチックで5年以内に割れる可能性は1%未満。簡単には割れません。5年間の製品保証がありメンテナンス費用が抑えられます。フタと本体にLOT NO. (製造日) が刻印されています。



優れたバクテリアバリア性

ISO11607に基づき、黄色ブドウ球菌のエアロゾルに対するフィルター効果を第三者機関で確認しています。iConステンレスフィルターは97.4%。他社製ペーパーフィルターの69.0%を凌駕し、無菌性を維持します。

滅菌コンテナー	フルサイズ	ミドルサイズ	ハーフサイズ	ロングサイズ	ミニサイズ
型式	iCon-FS	iCon-MS	iCon-HS	iCon-LS	iCon-mini
サイズ	580×294×150mm	455×294×150mm	285×294×150mm	694×298×105mm	290×160×60mm
標準					
型式	iCon-FX	iCon-MX	iCon-HX		
サイズ	580×294×105mm	455×294×105mm	285×294×105mm	ラパロタ	用ラック
浅型					

主要な材質

材質

本体・フタ:ポリフェニルサルフォン フィルター:ステンレス(SUS316L)

安全保存期間:6ヶ月 フィルターバクテリアバリア性:97.4% (参考:他社製ペーパーフィルター:69.0%) 安全性


高圧蒸気滅菌(プレバキューム式)・プラズマ滅菌・過酸化水素滅菌・EOG滅菌 滅菌有効性 5,000回滅菌後の目詰まりわずか4% フィルター面積50%でも滅菌可能 フィルター耐久性

バスケット	フルサイズ	ミドルサイズ	ハーフサイズ	ロングサイズ	ミニサイズ
型式	iMesh-FL	iMesh-ML	iMesh-HL	iMesh-LM	iMesh-mini
サイズ	540×255×50mm	415×255×50mm	245×255×50mm	650×255×60mm	260×130×40mm
標準					
型式	iMesh-FT	iMesh-MT	iMesh-HT		
サイズ	540×255×75mm	415×255×75mm	245×255×75mm	穴あきシリ	リコンマット
深型					

シリコンホルダー *ϕ*3,5,10,15,20他

ホールドピン

回収コンテナー	フルサイズ	ミドルサイズ	ハーフサイズ
型式	iCon-FR	iCon-MR	iCon-HR
サイズ	580×294×150mm	455×294×150mm	285×294×150mm
標準			

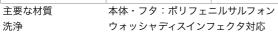

ステンレス (SUS304)





www.daito-nets.co.jp

大東金網株式会社

〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目10番11号 TEL (06)6541-9966 (代表) FAX (06)6541-9969 MAIL info@daito-nets.co.jp この資料の記載内容は2025年1月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ、お買い求めは信頼のある当店へ。